

## Planche de Transfert avec Poignées



NOUVEAU CODE	ANCIEN CODE
09 112 0724	AA8814

### Utilisation

Conçue pour faciliter le transfert des personnes handicapées d'un siège à un autre.

### Mode d'emploi

Poser sur le côté plat, placer une extrémité de la planche sous le corps de l'utilisateur et l'autre extrémité sur la surface de destination. Positionner convenablement la planche afin qu'elle supporte le poids total de l'utilisateur lors du transfert. La surface lisse de la planche convient mieux au transfert de personnes habillées. Pour transférer des personnes nues, placer une serviette sur la planche afin de faciliter le transfert.

### Attention

- Nous vous conseillons de ne pas utiliser la planche de transfert avec poignée sans avoir été formé à l'utiliser par un professionnel de santé. Pour certaines personnes, essayer un transfert sans l'assistance d'un auxiliaire de vie n'est pas recommandé.
- La planche ne doit pas être utilisée pour supporter plus de 190 kg.
- Inspecter la planche avant chaque utilisation, à la recherche de signes de détérioration. Ne pas utiliser la planche si elle semble fragilisée.
- S'assurer que la planche est solidement positionnée avant de placer du poids dessus.
- En cas de gonflement inhabituel, de décoloration de la peau ou de gêne, ne plus utiliser la planche et consulter un professionnel de santé.

Poids maximum de l'utilisateur 190 kg.

**Veillez conserver ce mode d'emploi pour toute utilisation ultérieure.**

**Homecraft Rolyan**, Une Société Patterson Medical,  
Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, Royaume-Uni, NG17 2HU  
**Royaume-Uni** : Tél : 08702 423 305 Fax 08701 660 211 [www.homecraftrolyan.com](http://www.homecraftrolyan.com)  
**International** : Tél : +44 1623 759 146 Fax : +44 1623 726 886

**Sammons Preston**, 4 Sammons Court, Bolingbrook, IL 60440-5071, États-Unis.  
Tél : 1-630-226-0000 Fax : 1-630-226-1390

**homecraft**

**Rolyan**

*Une Société Patterson Medical*