

# Safe-T-Strips

- Faciles à appliquer
- Faciles d'entretien
- Permanentes
- Utiles à la prévention contre les glissades et chutes dangereuses

## A830600

### Instructions d'application

Nettoyez minutieusement la baignoire ou la douche à l'aide d'eau chaude et d'un détergent abrasif ou non (selon les instructions de nettoyage de votre installation). Rincez et essuyez de sorte qu'aucun film de détergent ne demeure sur la surface. Laissez sécher à l'air libre pendant une demi-heure avant d'appliquer vos bandes Safe•T•Strips. Placez les bandes dans la position souhaitée sans retirer la pellicule protectrice. Retirez la pellicule protectrice et appliquez les bandes une à une en prenant soin de ne pas entrer en contact avec l'adhésif. Appuyez fermement sur toute la longueur des bandes en vous assurant que les bords sont bien en contact avec la surface. Laissez sécher l'adhésif 4 heures au minimum (24 heures de séchage sont préférables) avant d'utiliser la douche ou la baignoire.

Recommandations Lorsque vous utilisez des huiles de bain, versez-les une fois la baignoire remplie. Certaines huiles peuvent endommager les bandes lorsqu'elles entrent en contact direct avec le vinyle. Le nettoyage régulier de la baignoire contribue à maintenir les bandes en bon état.

**NE PAS UTILISER DANS LES BAIGNOIRES À SURFACE TEXTURÉE.**

