

L'évaluation

Quand vous appliquez ce test à un individu ou à un groupe, il est suggéré d'utiliser la feuille d'évaluation. Cette feuille d'évaluation doit être utilisée en convertissant l'évaluation en pourcentage ou en évaluation.

Un pourcentage total d'aptitude manuelle est obtenu avec ce test. On peut aussi trouver le pourcentage pour la main droite et gauche. La marque d'aptitude manuelle totale peut être trouvée en haut de la feuille. La dextérité individuelle de chaque main peut être trouvée en bas. Pour la praticité, les instructions de marques sont rappelées sur le coté de la feuille.

Le but final est d'obtenir l'aptitude manuelle totale en pourcentage comme ci-dessous :

1. Comptez le nombre de tiges vissées dans les logements. Notez le total sur la feuille, dans la case Tiges.
2. Comptez le nombre d'écrous sur les tiges. Notez le total sur le feuille, dans la case écrous.
3. Comptez le nombre total des rondelles et des écrous mises sur la barre en « T ». Notez dans la case rondelles et écrous, deux mains.
4. Maintenant additionnez les scores et notez le dans la case du Total.
5. Convertissez ce score en pourcentage en vous reportant au tableau de transcription ci dessous.

Le but final est d'obtenir un pourcentage pour la main gauche et la main droite en procédant comme ci dessous:

1. Comptez le nombre total des rondelles et écrou sur le coté gauche de la barre en « T » et notez dans la case écrous et rondelles main gauche.
2. Comptez le nombre total des rondelles et écrous sur le coté droit de la barre en « T » et notez dans la case écrous et rondelles main droite.
3. Convertissez le score de la main gauche en pourcentage.
4. Convertissez le score de la main droite en pourcentage.
5. Cette procédure nous a donné une évaluation pour les deux mains séparées.

Note: La feuille d'évaluation valide au maximum le test dans un groupe de travail.

Si il y a plus d'une rondelle ou écrou en continu sur la barre en « T » comptez les comme un seul. Donnez un point pour chacun.

Note : ce tableau de transcription en pourcentage est basé sur une Evaluation auprès de 4600 étudiants venant de tous les Etats des Etats-Unis d'Amérique avec un maximum de diversité sur les origines ou milieux sociaux culturels et sexe.

Pourcentage	Aptitude manuelle totale	Main gauche	Main droite
99	96 et +	24 et +	25 et +
98	91 – 95	22 – 23	23 – 24
95	87 – 90	21	22
90	83 – 86	20	21
80	80 – 82	19	20
70	77 – 79	18	19
60	74 – 76	17	18
50	71 – 73	16	17
40	68 – 70	15	16
30	66 – 67	14	15
20	61 – 65	13	14
10	56 – 60	12	13
5	46 – 55	11	11 – 12
2	38 – 45	10	9 – 10
1	0 – 37	0 – 9	0 - 8

Ce test est valable pour de nombreuses écoles techniques

**TEST D'APTITUDE MANUELLE
FEUILLE DE SCORE**

Nom : Fonction : Age : Sexe :

Feuille de marques

	SCORE
TIGES	
ECROUS	
RONDELLES ET ECROUS	
SCORE TOTAL	


RONDELLES ET ECROUS MAIN GAUCHE	
RONDELLES ET ECROUS MAIN DROITE	

Utilisez cette feuille pour calculer les pourcentage et écrivez le sur la feuille d'évaluation.

EVALUATION SEPARÉE MAIN GAUCHE / MAIN DROITE SI SOUHAITÉE : SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI DESSOUS

- 1 Comptez le nombre total des rondelles et écrou sur le coté gauche de la barre en « T » et notez dans la case écrous et rondelles main gauche.
- 2 Comptez le nombre total des rondelles et écrous sur le coté droit de la barre en « T » et notez dans la case écrous et rondelles main droite.
- 3 Convertissez le score de la main gauche en pourcentage.
- 4 Convertissez le score de la main droite en pourcentage.

RONDELLES ET
ECROUS
MAIN GAUCHE

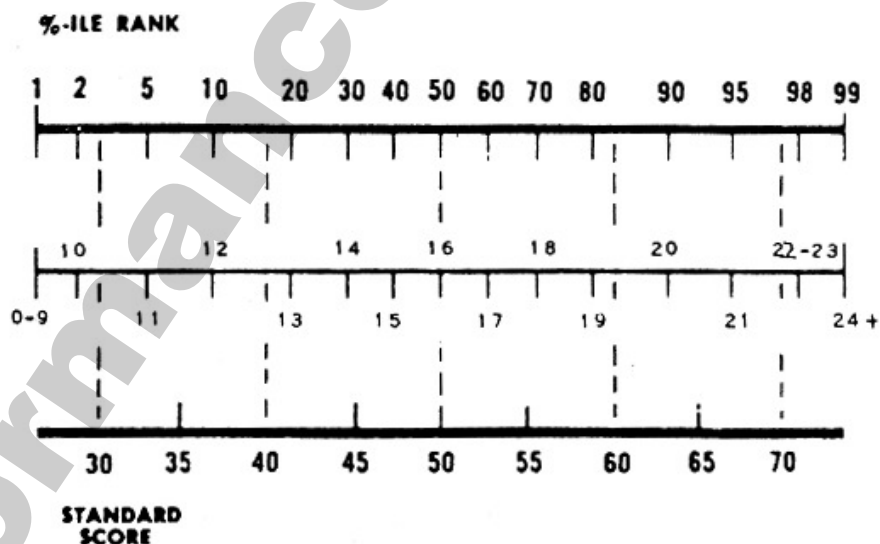

RONDELLES ET
ECROUS
MAIN DROITE

