



Introduction

Le cadre de marche releveur pliable est ajustable en hauteur. Il est fabriqué à partir de tubes en aluminium léger. Il peut être plié afin de faciliter son transport et son rangement.

Plier et déplier le déambulateur

Afin de déplier le déambulateur, Ouvrez ses pieds vers l'extérieur jusqu'à ce que le blocage de sécurité soit en place. Pour plier le déambulateur, fermez les pieds vers l'intérieur en appuyant sur le bouton pression de la sécurité situé au milieu de la barre avant.

Ajustement de la hauteur

Lorsque vous ajustez les jambes, assurez-vous qu'elles soient toutes réglées à la même hauteur (aux mêmes crans de réglage) et que le déambulateur est bien droit. Les boutons pressions doivent complètement dépasser des trous de réglages de chaque pied pour que ceux-ci soient bien verrouillés.

Pour régler la hauteur des poignées, placez-vous droit avec les bras le long du corps. Ajustez les jambes du déambulateur de sorte à ce que les poignées arrivent au niveau de vos poignets. Les coudes doivent être à un angle de 20 à 30 ° lors de l'utilisation. Cette hauteur offre le meilleur contrôle et la meilleure stabilité. Assurez-vous que les pieds du déambulateur soient toutes au niveau du sol.

Pour avancer, placez le déambulateur à une distance confortable de vous. Utilisez vos bras comme support. Avancez dans le cadre du déambulateur, mais n'avancez pas complètement, ne venez pas vous mettre contre la barre avant du déambulateur, cela pourrait vous faire perdre l'équilibre. Répétez le mouvement afin de marcher.

Lorsque vous tournez, marchez par petits pas afin de ne pas perdre l'équilibre. Lorsque vous vous asseyez, gardez appuie au déambulateur jusqu'à ce que vos jambes touchent la surface où vous vous asseyez. Placez alors une main sur la surface d'assise afin de vous stabiliser pendant que vous vous asseyez.

Nettoyage

Nettoyez à l'aide d'eau et d'un nettoyant non corrosif. Séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon propre.

Entretien

Avant l'utilisation, assurez-vous que les embouts en caoutchouc ne sont pas arrachés, usés ou manquants. Remplacez les avant l'utilisation si nécessaire.

Spécification

Le poids maximum de l'utilisateur ne doit pas excéder 136 kg.