




## Guide de mesure de l'Oval-8 (version imprimable)

Le guide de mesure d'Oval-8 vous aidera à définir la taille d'attelle convenant le mieux à votre doigt. Le moindre gonflement dû à un changement de température ou autres peut affecter la circonférence de votre doigt. Choisir qu'une seule taille d'attelle ne permet donc pas d'être sûr à 100 % que celle-ci convienne à toutes les situations. C'est ainsi que nous vous conseillons de commander un jeu de 3 tailles échelonnées pour une plus grande précision.



### Instructions du guide de mesure

Pour utiliser le guide de mesure, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et d'une règle millimétrée. Découpez le modèle ci-dessous en suivant les pointillés puis suivez les instructions en page 2.

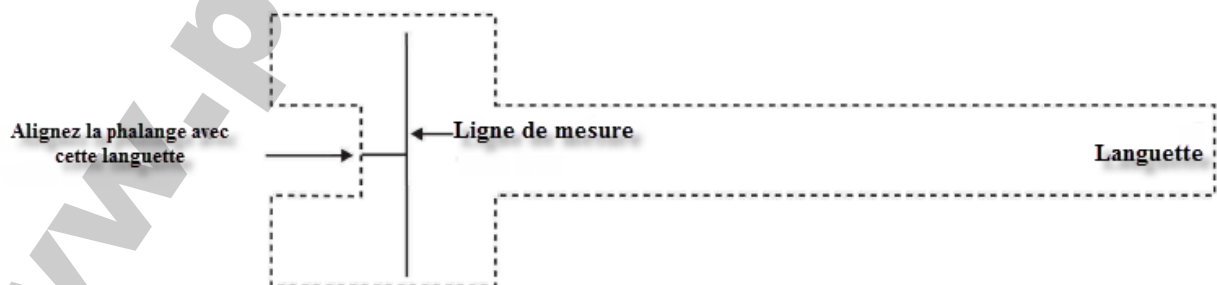

Voir la page 2 pour les instructions étape par étape.

## Instructions du guide de mesure

Les illustrations ci-dessous ne montrent que la mesure de la phalange intermédiaire (IPP), pour les problèmes concernant l'articulation intermédiaire.

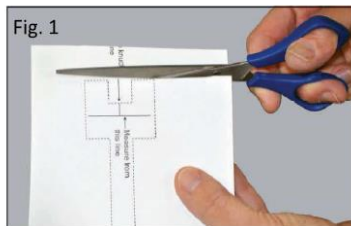
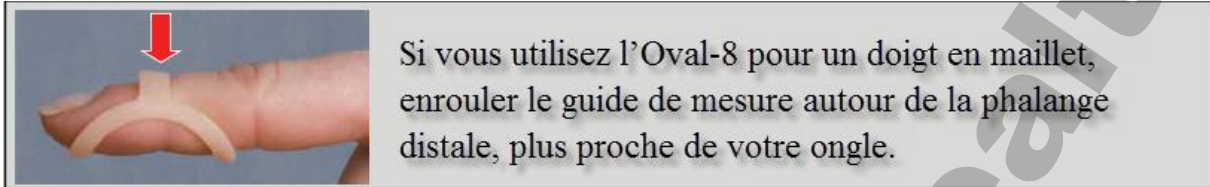


Fig. 1

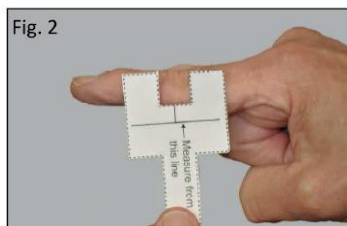


Fig. 2

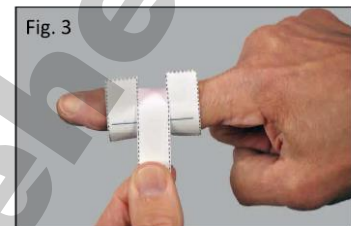


Fig. 3

1. Découpez le guide de mesure en suivant les pointillés.
2. Alignez le centre de l'entaille avec le centre de la phalange à mesurer.
3. Enroulez la languette autour du doigt puis dans l'encoche jusqu'à ce qu'elle chevauche la ligne de mesure.

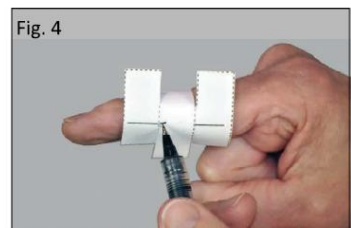


Fig. 4

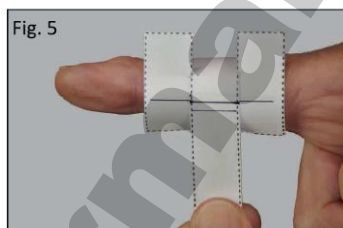


Fig. 5

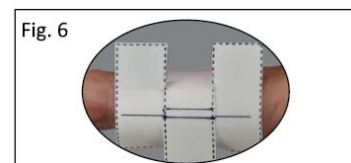


Fig. 6

4. Tirez **doucement** sur la languette pour qu'elle entoure uniformément l'articulation. Dessinez une ligne sur la languette à l'endroit où elle chevauche la ligne de mesure déjà présente.
5. Tirez ensuite la languette **plus fermement** autour de l'articulation pour une mesure plus serrée et dessinez une seconde ligne sur la languette à l'endroit où elle chevauche la ligne de mesure déjà présente.
6. Il est recommandé de marquer la languette aux deux endroits précisés ci-dessus pour établir une moyenne déterminant la taille d'Oval-8 dont vous aurez besoin.

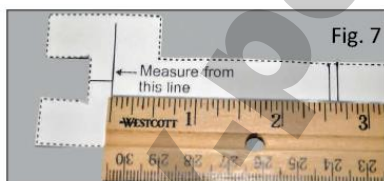


Fig. 7



Fig. 8

7. En utilisant une règle, mesurez les distances entre la ligne déjà présente et au milieu des 2 vôtres. Mesurez ces écarts au millimètre près.
8. Utilisez ces mesures pour déterminer l'échelle recommandée du jeu d'oval-8 pour votre doigt.

*\*Le guide de mesure ne garantit pas une mesure précise. La température et le moment de la journée peuvent affecter ces mesures.*



## TABLEAUX DE TAILLES

### Jeux échelonnés

Pour déterminer quel jeu échelonné commander, prenez en compte ces facteurs :

-Si il vous arrive d'avoir les doigts gonflés  
Commandez un jeu incluant des tailles plus grandes

- Si vous comptez porter l'attelle dans l'eau  
ou dans un climat froid, commandez un jeu  
incluant des tailles plus petites.

-Si vous avez des gonflements qui risque de s'atténuer  
commandez un jeu incluant des tailles plus petites

Jeux échelonnés de 3 attelles	Echelle de taille	Jeux échelonnés de 3 attelles	Echelle de taille
Tailles 2-3-4	4.3 cm à 4.95 cm	Tailles 8-9-10	6.14 cm à 6.8 cm
Tailles 4-5-6	4.95 cm à 5.7 cm	Tailles 10-11-12	6.8 cm à 7.4 cm
Tailles 6-7-8	5.7 cm à 6.14 cm	Tailles 13-14-15	7.65 cm à 8.2 cm

### Attelles individuelles

Si la mesure a été effectuée par un professionnel de la santé qui utilise les attelles Oval-8 ou que vous commandez une attelle supplémentaire / de remplacement, vous connaissez déjà la bonne taille. Vous pouvez donc commander une taille individuelle.

Taille Oval-8	Taille cm	Taille Oval-8	Taille cm	Taille Oval-8	Taille cm	Taille Oval-8	Taille cm
2	4.3 cm	6	5.7 cm	10	6.82 cm	14	8.09 cm
3	4.5 cm	7	5.86 cm	11	7.09 cm	15	8.2 cm
4	4.95 cm	8	6.14 cm	12	7.4 cm		
5	5.27 cm	9	6.35 cm	13	7.65 cm		

“ Votre partenaire  
aux solutions multiples



**PATTERSON**  
MEDICAL