

Autonomie & vie quotidienne > Equipements pour fauteuil et lit > Barrières de lit et matelas de sol



Barrière de lit avec piètement au sol Parnell Premier

Réf: 091322023

Description du produit

La barrière de lit Parnell Premier a été conçue pour être utilisée avec tous les lits domestiques, y compris les lits ajustables. Testée par l'Université de Newcastle conformément à la norme BS EN60601-2-52: 2010, cette barrière de lit contribue à empêcher le patient de tomber du lit.

Elle est facile à assembler et à ajuster sans outils. Les repose-pieds avant sont plats, évitant ainsi tout risque de trébuchement ou obstacle pour les fauteuils roulants ou les marchepieds. Elle peut supporter une force de 50 kg dans n'importe quelle direction lorsqu'elle est attachée au lit.

Caractéristiques:

- · Utilisation à domicile
- · Adaptée aux lits non médicalisés
- Pieds plats à l'extérieur pour l'accès fauteuil roulant
- · Solidaire du lit par utilisation de sangles
- Traction maximum horizontale: 50kg
- Dégagement requis : hauteur 3cm ; profondeur 31,8cm

Mise en place:

Pour installer la barrière de lit, la positionner près du lit et tourner le bouton noir dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les crochets maintiennent le lit (Bien serrer).

Pour retirer la barrière de lit, tourner le bouton noir dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les crochets s'abaissent et se libèrent du lit. Puis tout simplement pousser la barrière pour permettre l'entrée ou la sortie du lit. Système de fixation très simple et efficace ne nécessitant pas de pliage.

Spécificités techniques	
EAN	5028319033453
TVA	20 %
Long. totale	1m22
Haut. Totale	87cm
Dist. entre barres	intérieures 8cm
Poids	16kg
Poids maximum	114kg